



LIMPEZA DE DESINFECÇÃO PARA SUPERFÍCIES

MANUAL DO USUÁRIO

AKASPRAY TUCHER

- LIMPEZA DE DESINFECÇÃO PRONTA PARA USAR
- EFICAZ EM 30 SEGUNDOS

Propriedades do produto:

- Eficaz em 30 segundos.
- Lista VAH (DGHM) incluída.
- Livre de Aldeído e Fenol.

Áreas de uso:

AKASPRAY TUCHER não contém aldeído nem fenol e é um lenço desinfetante à base de álcool, de rápida eficácia.

É utilizado em equipamentos médicos (camas de pacientes, portas, instrumentos médicos, armários etc.) e superfícies existentes em salas cirúrgicas, salas de terapia intensiva, unidades odontológicas.

Forma de utilização:

- Utilize lenço suficiente de acordo com o tamanho da superfície a ser limpa.
- As contaminações visíveis (sangue, etc.) existentes na superfície são limpas primeiro.
- Em seguida, pegue novamente alguns lenços e limpe completamente o equipamento.
- Aguarde 30 segundos pelo tempo de efeito.
- Aplique dispositivos eletrônicos após desligar.

Ingredientes:

%50 Etanol, %10 2-Propanol, %0,05 Didesilmetiloksietilamonyumpropionat

Vantagens:

- Baixa duração do efeito
- Baktericida (incl. TBC e MRSA), fungicida e virucida (HIV, HBV, HCV)
- Não irritante
- Não prejudicial para superfícies.
- Fácil secagem e odor agradável.

Informações sobre primeiros socorros:

Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 15 min. Appear ao médico.

Em caso de ingestão, não vomitar. Beba bastante água e sacuda a boca e a garganta com água. Consulte imediatamente o médico.

DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ

A.Ş. 212 659 77 62 212 659 77 63

info@detrox.com.tr – www.detrox.com.tr