

DETRO OPA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Desinfetante de alto nível para instrumentos médicos e endoscópios

PROPRIEDADES DO PRODUTO:

Desinfetante de alto nível.

Adequado para utilização manual e para máquinas de lavagem e desinfeção de endoscópios e máquinas de lavagem e desinfeção de endoscópios.

Evita a corrosão dos utensílios graças aos inibidores de corrosão inibidores de corrosão, compatíveis com as marcas de endoscópios.

A solução não tem efeitos mutagénicos, embriotóxicos, teratogénico ou reprodutivo no ser humano. Graças à sua baixa toxicidade, proporciona uma utilização segura ao pessoal.

É inodora e não contém compostos gasosos nocivos

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO:

O Detro OPA é utilizado para a desinfeção de alto nível de instrumentos cirúrgicos, endoscópios flexíveis e rígidos. É compatível com dispositivos/equipamentos médicos feitos de poliestireno, aço inoxidável, PVC, material acrílico, policarbono, cerâmica, ABS, silicone, PEAD, borracha e vidro.

DUTILIZAÇÃO:

O Detro OPA é enchido num recipiente limpo e fechado. Os instrumentos previamente limpos e enxaguados são imersos cuidadosamente para que

todas as superfícies e cavidades sejam cobertas pela solução. Após o tempo de efeito, enxaguar com água esterilizada ou destilada. A solução no recipiente pode ser utilizada durante 14 dias, a atividade deve ser controlada diariamente por tiras de teste, a solução deve ser renovada quando as tiras não apresentarem a cor ativa existente nos tubos das tiras.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Orthophtalaldehyde; 0,55%, inibidor de corrosão, água desionizada.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Aspeto: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Característico

CONSERVAÇÃO:

Manter afastado da luz solar direta. Armazenar os recipientes bem fechados e numa área bem ventilada entre 0-25°C.

SEGURANÇA:

Ler as instruções de utilização antes de utilizar. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.

EMBALAGEM:

5L x 4 unidades